



IPAD

Intelligent Public Access Defibrillator

アイパッドNF1200

おてがるAED

- 簡単に操作が出来る、おてがるAED
- リファレンスガイド機能(救命工程がひと目でわかる)

心肺蘇生コーチング機能

- 大きくはっきりした、音声ガイダンス
- 1分間に100回のリズムでコーチング


【アイパッドNF1200 使用法】

1



電源を入れ、カバーを開けます。

2




服を脱がせます。

3



電極パッドの袋を確認して、電極パッドを取り出します。電極パッドの表面のカバーを剥がして、両方とも図のように貼り付けます。

4



電極パッドコネクタを本体の電極パッドコネクタ長口に差し込みます。

5



<分析中>
離れてしばらく待ちます。

6



指示が出たらショックボタンを押します。

【仕様】

販売名	アイパッド NF1200 [NF-NSP1]
電 種	使い捨て電極パッド
出力エネルギー	50Ω時150J
波 形	二相性波形除細動(e-cubu Biphasic)
パ ッ テ リ	DC12Vリチウム二酸化マンガンバッテリー (使い捨て長寿命一次電池)
パ ッ テ リ 容 量	200回の除細動(スタンバイ状態で4年間)
セルフテスト	毎日、毎週、毎月
寸 法 ・ 重 量	220mm×281mm×82mm(W×L×H) 2.2kg(バッテリー含む)
メモリー	40分(心電図、イベント情報) PC転送可(赤外線通信)
ガイド機能	操作手順とガイドラインに適した CPRコーピングを音声で案内

【構成】



AED本体

成人用電極パッド

使い捨てバッテリー

【消耗品】



成人用電極パッド
NF-0A05

小児用電極パッド
NF-0A12

使い捨てバッテリー
NF-0A06

【オプション】

- 管理ソフトウェア(NF-0A08)、赤外線通信アダプタ(NF-0A07)、キャリーバック(NF-0A01)、壁掛けブラケット(NF-0A09)

【関連品】

アイパッド NF1200 トレーナー

- アイパッド NF1200本体のトレーニング用機器
- 8つの標準的シナリオ
- 乾電池使用(単3電池6本)
- アイパッド NF1200の機能をシミュレート

NFT2【オプション】

- 充電器セット(充電器、充電池)



NFT2

! 日常点検を忘れずに!

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを誤作動したら、いつでも使用できるように、AEDのインジゲーターや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

AEDコールセンター ☎ 0120-910-256

製造元
株式会社シーユーメディカルシステム



製造販売業者
大宇ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-22
赤坂ツインタワー本館 18 階
TEL: 03-3224-7177
FAX: 03-3224-7170
http://japan.daewoo.com



- 取扱説明書及び注意事項をよくお読みの上正しくお使いください。
- 仕様、外観等の一部が都合により変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- AEDの設置管理者は、AEDに不測の事態が発生した時及び故障時(心電図監視装置等販売元の許可業者に限る)、廃止時には、連絡してください。
- 添付文書をお読みください。
- 電極パッドは1回限りの使い捨てです。